

# MYCIE I DEZYNFEKCJA UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH ORAZ SYSTEMÓW SSĄCYCH I ŚLINOCIĄGÓW

## Ślinociągi:

- Zassij 200 ml wody, zasysając naprzemiennie wodę i powietrze,
- Następnie zassij do ślinociągu preparat dezynfekcyjny, tak aby wypełnił całą jego powierzchnię,
- Odczekaj odpowiedni czas dezynfekcji,
- Przepłucz ślinociąg wodą.

## Ssaki:

- Zassij 200 ml wody, zasysając naprzemiennie wodę i powietrze,
- Zassij preparat dezynfekcyjny,
- Powtórz procedurę jeszcze raz lub dwa razy,
- Odczekaj wymagany czas dezynfekcji,
- Przepłucz ssak wodą.

## Spluwaczka:

- Do spluwaczki wlewa się odpowiednią ilość preparatu dezynfekcyjnego, tak aby pokryć całą powierzchnię ścianek,
- Szoruje z pomocą szczoteczki,
- Następnie pozostawia pod działaniem preparatu przez określony na ulotce czas,
- Na zakończenie należy przepłukać spluwaczkę wodą oraz wyszczotkować.

DO DEZYNFEKCJI UNITÓW I URZĄDZEŃ SSĄCYCH ODPOWIEDNI BĘDZIE QUATRODES UNIT LUB QUATRODES FORTE

ZOBACZ W SKLEPIE



dezynfekcja24.com