


O CZYM PAMIĘTAĆ PODCZAS PAKOWANIA NARZĘDZI DO STERYLIZACJI



W papierowo-foliowe opakowania zapakuj małe zestawy narzędzi, przeznaczone do jednego zabiegu.

1 zestaw narzędzi = 1 pacjent

Stosuj opakowania odpowiednie do metody sterylizacji.

Torebki napełniaj maksymalnie do pojemności 2/3 objętości zamkniętego pakietu.

Zabezpiecz ostre końcówki narzędzi – wykorzystaj osłonki.

Zależnie od metody testowania – umieść wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji wewnątrz opakowania.

Od brzegu rękawa zachowaj 2-3 cm odstępu od miejsca zgrzewu.

A close-up photograph of dental instruments, including a dental mirror and a dental explorer, resting on a blue surface. The instruments are metallic and have a polished finish. The background is a solid, light blue color.

Usuń nadmiar powietrza z pakietu.

Wykonaj zgrzew rękawa lub zamknij torebkę.

Oznakuj pakiety datą sterylizacji i datą przydatności do wykorzystania.

Pakiety przechowuj w odpowiednim miejscu, korzystając z metody FIFO do ich porządkowania.

Jeżeli pakiety zostaną uszkodzone przed użyciem należy traktować je jako niesterylne.



dezynfekcja24.com

SPÓŁKA Z O.O.